



<b>Наименование структурного подразделения:</b>	<b>Отделение специализированной помощи</b>		
<b>Названия документа:</b>	<b>СОП «Отоскоп ВЕТА 200 С Принадлeжностями сетевым адаптером»</b>		
<b>Утвержден:</b>	Руководитель ГКП на ПХВ «ЛГП» Чалкаров А.Б.		
<b>Дата утверждения:</b>			
<b>Разработчик:</b>	<i>Должность</i>	<i>Ф.И.О.</i>	<i>Подпись</i>
	Оториноларинголог врачи	Ганиева Г.Б. Крабаев Х.А.	
	Заведующий отделением	Садыков Г.Б.	
<b>Согласовано:</b>	Заместитель гл.врача по лечебному делу	Анаркулова У.О.	
	Заместитель гл.врача по контролю качества мед.услуг	Рысбаев С.Т.	
	Врач эксперт		
<b>Дата согласования:</b>	04.01.2024г.		
<b>Дата введения в действие</b>	04.01.2024г.		
<b>Версия №</b>	<b>Копия №</b> _____	_____/_____/2024г. Ф.И.О. _____ Подпись _____	

Дата последнего пересмотра « 04 » « 01 » 2024г  
 Дата следующего пересмотра « \_\_\_\_\_ » « \_\_\_\_\_ » 2027г

**Отоскоп ВЕТА 200 С Принадлежностями с сетевым адаптером**

**1. Цель:** Отоскоп ВЕТА 200 С предназначен для исследования наружного уха, общего неинвазивного исследования. Обеспечивает однородное яркое освещение беспрепятственный вид на слуховой проход и барабанную полость.

**2. Область применения:** Кабинет Лор врача.

**3. Определения:** Обследование и диагностирование слухового прохода барабанную полость.

**4. Ресурсы/Оснащение:** 1) Антисептическое мыло и кожный антисептик для обработки рук.

**5. Документирование:** Соответствующие формы медицинской карта амбулаторного больного (на запись по программы кмис).

**6. Основная часть процедуры:** проводится с помощью отоскопа ВЕТА 200 С принадлежностями с сетевым адаптером.

Нужно использовать только рукоятки и источники питания, предназначенные для медицинских приборов. Надо обязательно прикрепить к отоскопу воронку перед тем, как вставлять его в ухо.

Прикрепить воронку к голове отоскопа так, чтобы выступ вошел в отверстие, потом повернуть воронку по часовой стрелке, чтобы зафиксировать её.

При обычном обследовании смотровое окошко должно быть закрыто.

Для проведения пневматического теста надо прикрепить инсuffляционный порт.

Для облегчения инструментального вмешательства надо повернуть смотровое окошко в сторону так, чтобы можно было работать с увеличением.

**7. Примечания:** Отоскоп можно использовать с воронкой или без нее для универсального освещения, например ротовой полости или кожи. Надо избегать контакта с чувствительной или поврежденной кожей.

**8. Обработка аппарата:** Протирать внешнюю поверхность мягкой тканью внутреннюю - ватным тампоном, при необходимости смоченным спиртом. Газовая стерилизация запрещена. Нельзя погружать в жидкость.

**9. Указание условия пересмотра СОП:** Пересмотр СОП проводится 1 раз в 3 года или при появлении новых требований.

**10. Нормативные ссылки:**

- Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения, а также инструкций по их заполнению» № ҚР ДСМ-175/2020;

- Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 ноября 2021 года «Об утверждении стандартов аккредитации медицинских организаций» « № ҚР ДСМ – 111.

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 августа 2021 года № «Об утверждении «Правил оказания первичной медико-санитарной помощи» ҚР ДСМ-90



### Лист регистрации изменений

№	№ раздела, пункта стандарта, в которое внесено изменение	Дата внесения изменения	ФИО лица, внесшего изменения



Лист ознакомления

№	Фамилия И.О.	Должность	Дата	Подпись
1	Шокибаев Г	мер. с	04.01.2024	
2	Ахмедбаева З.С	мер. себга	04.01.2024	
3	Тотайбева А	мер. себга	04.01.2024	
4	Компанкурсов	медсестра	04.01.2024	
5	Ирмистова А	анушер	04.01.2024	
6	Абдулкеримов О.И	мл. мед	04.01.2024	
7	Ваширова А.В	уч. м/с	04.01.2024	
8	Жаракметов Р.Т	ст. мер.	04.01.2024	
9	Сардауб С.А	Техник	04.01.2024	
10	Абдиева Г. Э	стоматолог	04.01.2024	
11	Абдусамиев М	стол. м/с	04.01.24	
12	Обаева А.О	стоматолог	04.01.24	
13	Торшибаева С.И	стол. зуб врач	04.01.24	
14	Мунпарова М.	ст. мед. м/с	04.01.24	
15	Арибаев Г	стол. м/с	04.01.24	
16	Самбаева А. А	стол. ст. м/с	04.01.2024	
17	Сағрбаев. В. Н.	стоматолог	04.01.2024	
18	Шокибаев М. К	кзр м/с	04.01.2024	
19	Кирбайли А. И	Мед. сестра	04.01.2024	
20	Ишметов Г. И	мл. мер	04.01.2024	
21	Ишметов Б. Т	терапевт	04.01.2024	
22	Ахмедова Р. В	мер. себга	04.01.2024	
23	Ахмедова М.	мед. м/с	04.01.2024	
24	Жарочев Ф	мед. м/с	04.01.2024	
25	Ишметов И	Медсестра	04.01.2024	
26	Ишметова С	м/с	04.01.24	

