




Наименование структурного подразделения:	Отделение специализированной помощи		
Названия документа:	СОП «Отоларингологический прибор АТМОС С 31»		
Утвержден:	Руководитель ГКП на ПХВ «ЛГП» Чалкаров А.Б.		
Дата утверждения:			
Разработчик:	<i>Должность</i>	<i>Ф.И.О.</i>	<i>Подпись</i>
	Оториноларинголог врачи	Крабаев Х.А. Ганиева Г.Б.	
	Заведующий отделением	Садыков Г.Б.	
Согласовано:	Заместитель гл.врача по лечебному делу	Анаркулова У.О.	
	Заместитель гл.врача по контролю качества мед.услуг	Рысбаев С.Т.	
	Врач эксперт		
Дата согласования:	04.01.2024г.		
Дата введения в действие	04.01.2024г.		
Версия №	Копия № _____	_04_ /01_ / 2024г. Ф.И.О. _____ Подпись _____	

Дата последнего пересмотра « 04 » « 01 » 2024г

Дата следующего пересмотра « _____ » « _____ » 2027г

	ГКП на ПХВ "Ленгерская городская поликлиника" УЗ Туркестанской области	Тип документа: СОП	
	Система менеджмента качества	Версия: 1	Страница: 2 из 4

Стандарт операционных процедур Отоларингологический прибор АТМОС С 31

1. **Цель:** Аппарат для проведения диагностических обследований и терапевтического лечения заболеваний ЛОР-органов. Состав комплектующих приспособлений подбирается индивидуально под каждого врача. Эргономичная конструкция обеспечивает значительное удобство эксплуатации и работы.
2. **Область применения:** Кабинет лор врача.
3. **Определения:**
4. **Ресурсы/Оснащение:**
 - 1) Антисептическое мыло и кожный антисептик для обработки рук.
5. **Документирование:** Соответствующие формы медицинской карты амбулаторного больного (на запись по программы КМИС).
6. **Основная часть процедуры:** проводится она с помощью прибора АТМОС С31.

Врач, располагается напротив пациента и оптимально позиционирует его с минимальным использованием рук. Это экономить время и Ваши усилия с излишние передвижения.

АТМОС С 31 может быть использован только под наблюдением в помещениях, оборудованных для медицинских целей, а не в помещения, в которых применяются; взрывоопасные вещества.

Применения:

- Отсасывающая система не должна применяться для отсасывания горючих ил) взрывчатых жидкостей и газов.
- Система холодного света применяется только для операционных эндоскопог налобных ламп холодного света и микроскопов.
- Быстрый нагреватель зеркал предназначен только для быстрого нагревании инструментов для обследования, которые в основном сделаны из металла, например зеркала для гортани или шпатели.
- Подогреваемое крепление для эндоскопов используется исключительно ка держатель для чистых и стерилизованных эндоскопов.

® Крючок для лобной лампы может использоваться исключительно Д1 подвешивания налобной лампой.

- Место для использованных инструментов: для быстрого удаления использовании инструментов с «чистой» рабочей области
- Система сжатого воздуха (опция) может использоваться только для применен! медикаментов в области носоглотки с помощью распылителей.

Система промывания ушей (опция) не может использоваться, если слуховой кан; воспален или загрязнен. Этот прибор предназначен для кратковременных процесс; с пациентом

Подогреватель зеркал используется только для подогревания гортанных зеркал различных размеров, которые в основном сделаны из металла.



7. Примечания: не допускать усилия при введении инструмента в естественные отверстия человека. Проверять температуру подаваемой жидкости, а также температуру используемых инструментов непосредственно перед применением.

8. Обработка аппарата: протирать поверхность прибора тряпкой, смоченной в моющем или дезинфицирующем растворе.

Всех комплектующих часть надо тщательно прокипятить, стерилизовать в автоклаве (до 136°C), дезинфицировать при помощи дезинфектантов для инструментов. Все комплектующие, которое находятся в прямом контакте с пациентом, должны быть немедленно очищены или заменены. Накопительная емкость с крышкой и бактериальным фильтром должны быть очищены и стерилизованы каждый рабочий день.

Накопительная емкость должна быть удалена и промыта раз в неделю. Во время очистки емкости крышка должна быть тщательно промыта под проточной водой. Емкость может быть простерилизована в автоклаве. Перед помещением емкости обратно электроды на крышке должны быть очищены с помощью влажной тряпкой. Аспирационные шланги надо стерилизовать в автоклаве или тщательно прокипятить.

Распылительные трубки должны заменяться перед каждым использованием. Перед стерилизацией надо тщательно промыть подносы под проточной водой.

9. Указание условия пересмотра СОП: Пересмотр СОП проводится 1 раз в 3 года или при появлении новых требований.

. Нормативные ссылки:

- Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения, а также инструкций по их заполнению» № ҚР ДСМ-175/2020;

-Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 ноября 2021 года «Об утверждении стандартов аккредитации медицинских организаций» «№ ҚР ДСМ – 111.

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 августа 2021 года № «Об утверждении «Правил оказания первичной медико-санитарной помощи» ҚР ДСМ-90

Лист регистрации изменений

№	№ раздела, пункта стандарта, в которое внесено изменение	Дата внесения изменения	ФИО лица, внесшего изменения



Лист ознакомления

№	Фамилия И.О.	Должность	Дата	Подпись
1	Шокиев М	мер.с	04.01.2024	
2	Абдиева З.С	мер.себра	04.01.2024	
3	Тотайев А	мер.себра	04.01.2024	
4	Халипайкулов	мер.себра	04.01.2024	
5	Ирматов А	анушер	04.01.2024	
6	Дуболенко О.И	ин.мер	04.01.2024	
7	Винурова А.И	уч.м/с	04.01.2024	
8	Жаракчиев Д.Т	ст.мер.	04.01.2024	
9	Сардобаев С.А	Гигиенист	04.01.2024	
10	Абдиева Г.Э	стоматолог	04.01.2024	
11	Абдурашиев М	стол. м/с	04.01.24	
12	Обаева А.О	стоматолог	04.01.24	
13	Торшибаева С.И	стол. зуб. врач	04.01.24	
14	Жанмуратов М	ст. м/с	04.01.24	
15	Абдиев Б	стол. м/с	04.01.24	
16	Самиева А.А	стол. м/с	04.01.2024	
17	Саурбаев А.И	стоматолог	04.01.2024	
18	Шокиев М.К	КЗР м/с	04.01.2024	
19	Курбанов А.И	мер.себра	04.01.2024	
20	Ибрагимов И	ст. м/с	04.01.2024	
21	Ибрагимов Б.Т	терапевт	04.01.2024	
22	Ибраимова Р.В	мер.себра	04.01.2024	
23	Абдиева М	мер.себра	04.01.2024	
24	Жариев И	мер.себра	04.01.2024	
25	Ибрагимов И	мер.себра	04.01.2024	
26	Ибраимова С	мер.себра	04.01.2024	

