



Наименование структурного подразделения:	Отделение специализированной помощи		
Названия документа:	СОП «Аудиометр автоматизированный»		
Утвержден:	Руководитель ГКП на ПХВ «ЛГП» Чалкаров А.Б.		
Дата утверждения:			
Разработчик:	<i>Должность</i>	<i>Ф.И.О.</i>	<i>Подпись</i>
	Оториноларинголог врачи	Крабаев Х.А. Ганиева Г.Б.	
	Заведующий отделением	Садыков Г.Б.	
Согласовано:	Заместитель гл.врача по лечебному делу	Анаркулова У.О.	
	Заместитель гл.врача по контролю качества мед.услуг	Рысбаев С.Т.	
	Врач эксперт		
Дата согласования:	04.01.2024г.		
Дата введения в действие	04.01.2024г.		
Версия №	Копия № _____	04 /01 _____ / 2024г. Ф.И.О. _____ Подпись _____	

Дата последнего пересмотра « 04 » « 01 » 2024г
 Дата следующего пересмотра « _____ » « _____ » 2027г



Стандарт операционных процедур Аудиометр автоматизированный АА-02

1. Цель: Аудиометр автоматизированный АА-02 (в дальнейшем аудиометр!) предназначен для оценки функционального состояния слухового анализатора человека путем определения порогов слышимости по воздушному и костному звукопроводению методом сравнения слуха обследуемого с характеристиками, эквивалентными порогу слышимости отологически нормального человека, а также путём проведения надпороговых тестов.

- 1. Область применения:** Кабинет лор врача.
- 2. Определения:** Определение порогов слышимости тональных сигналов по воздушному и костному звукопроводению.
- 3. Ресурсы/Оснащение:** 1) Антисептическое мыло и кожный антисептик для обработки рук.
- 4. Документирование:** Соответствующие формы медицинской карты амбулаторного больного (на запись по программы кмис).
- 5. Основная часть процедуры:** Проводится с помощью аудиометра автоматизированного АА-02.

Надо подключить телефон, вибратор, кнопку пациента и сетевой шнур в соответствующим разъёмам на задней панели аудиометра, затем аудиометр к сети. Надо включить аудиометр (сетевой тумблер находится на задней панели).


Врач должен проинструктировать обследуемого; «Слушайте и нажимайте *кнопку ОТВЕТ* при появлении звука в телефонах. Не забывайте отпускать кнопку после каждого нажатия». Обследуемый должен сесть около прибора, надеть и подогнать по размеру оголовье с телефонами (на правом ухе должен находиться «красный⁵» телефон, на левом - «голубой⁵⁵», отверстия амбушюров должны находиться напротив наружных слуховых проходов).

Для проверки порядка подачи частот надо нажимать кнопку ПРОГР. Кнопка ПРОГР поочередно выводит на индикатор 3 перечня: полный, последний установленный, формируемый в данный момент. При каждом последующем включении аудиометра частоты подаются по последнему установленному перечню. После проверки перечня частот надо нажимать кнопку АВТ. Аудиометр готов к работе. Обследуемый должен нажать и отпустить кнопку ОТВЕТ. Аудиометр автоматически переходит в режим тренировки.

Тренировка проводится с целью научить обследуемого правильно нажимать кнопку ОТВЕТ (правильным считается нажатие во время звучания тона в телефоне).

Обследуемому подаются заведомо слышимые звуки тон первой записанной частоты интенсивностью 5 0дБ или 70дБ. Подача звука отображается на индикаторе «звездочками».

Если обследуемый не отвечает (плохо понял инструкцию, не слышит, не хочет отвечать) или не дает трех правильных ответов подряд, включается звуковой сигнал,

	ГКП на ПХВ "Ленгерская городская поликлиника" УЗ Туркестанской области	Тип документа: СОП	
	Система менеджмента качества	Версия: 1	Страница: 3 из 4

на индикаторе появляется следующее изображение: ТРЕНИРОВКА ПРОШЛА
НАЖМИТЕ КНОПКУ АВТ.

В этом случае надо нажимать кнопку АВТ, проведите дополнительный инструктаж и запустите повторно программу тренировки (пациент должен нажать кнопку ОТВЕТ).

После определения порогов правого уха процесс обследования авто-матическ: повторяется на левом ухе с тем же порядком предъявления частот.

6. Примечания: Работа с прибором должна проводиться квалифицированными медицинским персоналом, предварительно изучившим настоящее руководство. Перед началом обследования каждого пациента нажмите кнопку СБРОС, при этом результаты предыдущего обследования из памяти аудиометра будут удалены.

7. Указание условий пересмотра СОП:

Пересмотр СОП проводится 1 раз в 3 года или при появлении новых требований.

8. Нормативные ссылки:

- Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения, а также инструкций по их заполнению» № ҚР ДСМ-175/2020;
- Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 ноября 2021 года «Об утверждении стандартов аккредитации медицинских организаций» « № ҚР ДСМ – 111.
- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 августа 2021 года № «Об утверждении «Правил оказания первичной медико-санитарной помощи» ҚР ДСМ-90

Лист регистрации изменений

№	№ раздела, пункта стандарта, в которое внесено изменение	Дата внесения изменения	ФИО лица, внесшего изменения



Лист ознакомления

№	Фамилия И.О.	Должность	Дата	Подпись
1	Шокибаев Г	мр.с	04.01.2024	[Signature]
2	Ахмедбаева З.С	мед.сестра	04.01.2024	[Signature]
3	Тотайбева А	мед.сестра	04.01.2024	[Signature]
4	Калимуллин В	мед.сестра	04.01.2024	[Signature]
5	Ирматов А	анушёр	04.01.2024	[Signature]
6	Абдулкеримов О.И	мл.мл	04.01.2024	[Signature]
7	Вашурова А.А	уч.млс	04.01.2024	[Signature]
8	Жаракметов Р.Т	ст.млс	04.01.2024	[Signature]
9	Сардауб С.А	Техник	04.01.2024	[Signature]
10	Абдиева Г.Э	стоматолог	04.01.2024	[Signature]
11	Абдурашидов М	стол.млс	04.01.24	[Signature]
12	Обташева А.О	стоматолог	04.01.24	[Signature]
13	Торшбаева С.И	стол.зуб.врач	04.01.24	[Signature]
14	Мамларова М.	стол.млс	04.01.24	[Signature]
15	Арипов Г	млч.мл	04.01.24	[Signature]
16	Семетбаева А.А	стол.ст.млс	04.01.2024	[Signature]
17	Саурбаев А.А	стоматолог	04.02.2024	[Signature]
18	Шокибаев Г.К	кзр.млс	04.01.2024	[Signature]
19	Кыбали А.И	млч.сестра	04.01.2024	[Signature]
20	Исмаилов Г.И	мл.мл	04.01.2024	[Signature]
21	Курманов В.Т	терапевт	04.01.2024	[Signature]
22	Исмаилов Р.В	мед.сестра	04.01.2024	[Signature]
23	Абдиева М.	мед.сестра	04.01.2024	[Signature]
24	Мамларова Ф	мед.сестра	04.01.2024	[Signature]
25	Курманов И	млч.млс	04.01.2024	[Signature]
26	Чиркеева С	млс	04.01.24	[Signature]

