



Наименование структурного подразделения:	ГКП на ПХВ «Ленгерская Городская поликлиника»		
Названия документа:	СОП «Закладывание материала в биксы для проведения стерилизации»		
Утвержден:	Руководитель ГКП на ПХВ «ЛГП» Чалкаров А.Б.		
Дата утверждения:			
Разработчик:	<i>Должность</i>	<i>Ф.И.О.</i>	<i>Подпись</i>
	Главная медсестра	Каракулова Д.Т.	
	Врач эпидемиолог	Тургимбаева Г.А.	
Согласовано:	Заместитель гл.врача по лечебному делу	Анаркулова У.О.	
	Заместитель гл.врача по контролю качества мед.услуг	Рысбаев С.Т.	
	Врач эксперт		
Дата согласования:	04.01.2024г.		
Дата введения в действие	04.01.2024г.		
Версия №	Копия № _____	04 /01 _____ / 2024г. Ф.И.О. _____ Подпись _____	

Дата последнего пересмотра « 04 » « 01. » 2024г

Дата следующего пересмотра « _____ » « _____ » 2027г



Стандарт операционных процедур:

Закладывание материала в биксы для проведения стерилизации

1. Назначение:

Определяет порядок действий при закладке материала для проведения стерилизации изделия медицинского назначения.

2. **Исполнитель:** медицинские сестры.

3. **Контроль:** старшая медсестра, медсестра инфекционного контроля, главная медсестра, врач-эпидемиолог.

4. Требования к выполнению процедуры:

1) К работе допускается персонал, изучивший настоящий СОП.

2) Перед началом работы наденьте санитарную одежду, сменную обувь и средств индивидуальной защиты (далее СИЗ).

5. Оборудование и материалы:

1) материалы и изделия медицинского назначения (далее - материалы);

2) бикс с фильтром, без фильтра;

3) дезсредство;

4) бирки для регистрации даты стерилизации;

6. Последовательность выполнения процедуры:

1) Перед укладкой материалов и изделий в барабан стерилизующей коробю следует:

1. Принимать чистые, без старых индикаторов, с четкой маркировкой (отделение кабинет), с внутренним фильтром-вкладышем (два слоя ткани, покрывающие дно I стенки круглых биксов) стерилизационные коробки;

2. Проверять каждый раз исправность стерилизующих коробок; отсутствию деформаций, плотность закрытия крышки, исправность замков, легкость передвижения пояса и точность совпадения отверстий корпуса с отверстиями пояса прочность фиксации металлического пояса к корпусу зажимным устройством. Запрещается использовать стерилизационные коробки с неисправными замками оторванными петлями, с отслужившими срок эксплуатации фильтрами I поврежденными уплотнительными прокладками и т.п.

3. Обработать методом протирания бикс изнутри (от середины бикса постепенн< переходя на боковые поверхности и внутреннюю часть крышки) и снаружи (о наружной крышки боковых поверхностей и дна бикса) салфеткой, смоченной 0,5% раствором нашатырного спирта или разрешенным для использования в этих целях дезсредства согласно инструкции по применению;

- отодвинуть круговую пластинку, закрывающую боковые отверстия бикса;

- откинуть крышку;

- выстелить дно и стенки бикса холщовым мешком, салфеткой, простыней;

4. Уложите материалы вертикально (на ребро), послойно, секторально и рыхло (чтобы между стерилизуемыми материалами помещался кулак руки);

5. Расположите в биксе термоиндикаторы в наиболее труднодоступные для проникновения пара места, на 3-х уровнях (на дно бикса, в середине и сверху



материала), труднодоступными (трудностерилизуемыми) являются: пористые изделия - полотенца, халаты, простыни и др.; изделия с внутренними полостями и каналами - перчатки, катетеры, чашки Петри и др;

6. Закройте бикс;

7. Прикрепите к ручке бикса бирку с указанием структурного подразделения и даты проведения стерилизации;

8. Доставьте биксы в кабинет для отправки в стерилизации.

7. Указание условий пересмотра СОП:

Пересмотр СОП проводится 1 раз в 3 года или при появлении новых требований.

8. Нормативные ссылки:

- Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения, а также инструкций по их заполнению» № ҚР ДСМ-175/2020;

- Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 ноября 2021 года «Об утверждении стандартов аккредитации медицинских организаций» « № ҚР ДСМ – 111.

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 августа 2021 года № «Об утверждении «Правил оказания первичной медико-санитарной помощи» ҚР ДСМ-90

Лист регистрации изменений

№	№ раздела, пункта стандарта, в которое внесено изменение	Дата внесения изменения	ФИО лица, внесшего изменения

