



Наименование структурного подразделения:	ГКП на ПХВ "Ленгерская городская поликлиника" УЗ Туркестанской области		
Названия документа:	СОП «Очистка и дезинфекция оборудования и медицинских приборов»		
Утвержден:	Руководитель ГКП на ПХВ «ЛП» Чалкаров А.Б.		
Дата утверждения:			
Разработчик:	<i>Должность</i>	<i>Ф.И.О.</i>	<i>Подпись</i>
	Заместитель гл.врача по лечебному делу	Анаркулова У.О.	
	Врач эпидемиолог	Тургимбаева Г.А.	
Согласовано:	Заместитель гл.врача по ОМД	Кабылбеков Г.К.	
	Заместитель гл.врача по контролю качества мед.услуг	Рысбаев С.Т.	
	Врач эксперт		
Дата согласования:	04.01.2024г.		
Дата введения в действие	04.01.2024г.		
Версия №	Копия № _____	04 /01 _____ / 2024г. Ф.И.О. _____ Подпись _____	

Дата последнего пересмотра « 04 » « 01. » 2024г
Дата следующего пересмотра « _____ » « _____ » 2027г



**Стандарт операционных процедур:
Очистка и дезинфекция оборудования и медицинских приборов**

1. Цель: Профилактика инфекционных заболеваний

2. Назначение:

Устанавливает порядок проведения очистки и дезинфекции оборудования и медицинских приборов.

3. Исполнитель: медицинские сестры.

4. Контроль: старшая медсестра, медсестра инфекционного контроля, главная медсестра, врач-эпидемиолог, заведующий отделением.

5. Требования к выполнению процедуры:

1) К работе допускается персонал, изучивший настоящий СОП и меры предосторожности при работе с биоматериалом.

2) Перед началом работы наденьте санитарную одежду, сменную обувь и средства индивидуальной защиты (далее СИЗ).

6. Оборудование и материалы:

1) СИЗ (резиновые перчатки, маска);

2) маркированные емкости для обработки оборудования;

3) маркированная ветошь для оборудования;

4) рабочий раствор дезинфицирующего средства, позволяющий совмещать дезинфекцию с очисткой в одном этапе;

5) антисептик для рук;

6) КБСУ.

7. Последовательность выполнения процедуры:

1) Подготовьте маркированную ветошь и емкости для обработки оборудования.

2) При выборе дезсредства, в целях исключения их вредного воздействия на медицинские приборы и оборудование, руководствуйтесь рекомендациями производителей этих изделий о совместимости конкретных дезсредств с материалами, использованными при изготовлении данных приборов и оборудования.

3) Предварительную очистку для удаления биологических и других загрязнений проведите путем протирания салфетками с использованием слабого раствора дезинфицирующего средства, разрешенного для этих целей, в режиме предстерилизационной очистки.

4) Приготовьте рабочий раствор дезинфицирующего средства, выбирая наиболее высокую концентрацию и более длительное время обеззараживания для профилактики и борьбы с вирусными инфекциями.

Примечание: проводите ротацию дезинфицирующих средств для предупреждения развития резистентности бактерий и вирусов к действию химических дезинфекционных средств.

5) Отключите аппараты/оборудование от электрической сети.




- 6) Очистку и дезинфекцию медицинских приборов и оборудования проведите дезинфицирующими средствами, в инструкциях по применению которых есть рекомендации по обеззараживанию данной аппаратуры.
- 7) Дезинфекцию внутренних поверхностей проводите способом протирания, различных приспособлений - погружением в растворы дезинфицирующих средств по режимам (концентрация раствора, время дезинфекционной выдержки), рекомендованным для профилактики вирусных инфекций.
- 8) Ветошь смочите дезинфицирующим раствором и тщательно протрите внутренние поверхности, а затем наружные поверхности аппарата.
- 9) Обработанные поверхности протрите второй раз (через 15 минут) дезинфицирующим раствором, затем смойте чистой водой с использованием чистой ветоши.
- 10) После завершения обработки, ветошь обеззаразьте в дезинфицирующем растворе (соответствующей концентрации и времени экспозиции согласно инструкции к дезсредству), прополощите в воде до исчезновения запаха дезинфицирующего средства и высушите на специальных приспособлениях в комнате для хранения инвентаря.
- 11) Дезинфицирующий раствор после использования вылейте в канализационную сеть.
- 12) Использованные перчатки утилизируйте в КБСУ.
- 13) Помойте руки и обработайте их антисептиком.

8. Указание условия пересмотра СОП: Пересмотр СОП проводится 1 раз в 3 года или при появлении новых требований.

9. Нормативные ссылки:

- Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения, а также инструкций по их заполнению» № ҚР ДСМ-175/2020;
- Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 ноября 2021 года «Об утверждении стандартов аккредитации медицинских организаций» « № ҚР ДСМ – 111.
- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 августа 2021 года № «Об утверждении «Правил оказания первичной медико-санитарной помощи» ҚР ДСМ-90
- Приказ Министра здравоохранения РК от 11.08.2020г. №96 «Об утверждении санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения»;

	ГКП на ПХВ "Ленгерская городская поликлиника" УЗ Туркестанской области Система менеджмента качества	Тип документа: СОП	
		Версия: 1	Страница: 4 из 5

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 июля 2022 года № КД ДСМ-68. "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации".

Лист регистрации изменений

№	№ раздела, пункта стандарта, в которое внесено изменение	Дата внесения изменения	ФИО лица, внесшего изменения

