



Наименование структурного подразделения:	Отделение специализированная помощь		
Названия документа:	СОП «SEP-108 Plus шприцевые инфузионные насосы»		
Утвержден:	Руководитель ГКП на ПХВ «ЛГП» Чалкаров А.Б.		
Дата утверждения:			
Разработчик:	Должность	Ф.И.О.	Подпись
	Врач дневного стационара	Кузембай Б.	
	Отв. лицо за «Синий код»	Бегасилов С.Д.	
Согласовано:	Заместитель гл.врача по лечебному делу	Анаркулова У.О.	
	Заместитель гл.врача по контролю качества мед.услуг	Рысбаев С.Т.	
	Врач эксперт		
Дата согласования:	04.01.2024г.		
Дата введения в действие	04.01.2024г.		
Версия №	Копия № _____	04 /01 _____ / 2024г. Ф.И.О. _____ Подпись _____	

Дата последнего пересмотра « 04 » « 01 » 2024г
Дата следующего пересмотра « _____ » « _____ » 2027г



СОП «SEP-10S Plus шприцевые инфузионные насосы»

1. **Цель:** Насос разработан с целью удовлетворения современных изменяющихся клинических требований к введению жидкостей и медикаментов

2. **Предназначена:** Шприцевый насос для внутривенного (в/в), внутриартериального (в/в), эпидурального или подкожного пути введения лекарственных растворов. Скорость инфузии программируется от 0,1 до 1500 мл/ч. Снасосом могут использоваться одноразовые шприцы объемом от 10 до 100 мл, по дополнительному заказу-5 мл.

Шприцевый насос позволяет пользователю выбрать конфигурацию ключевых функций в соответствии со специфическими требованиями. Конфигурируемые функции легко могут быть пересмотрены и изменены при необходимости соответствия новым или изменившимся режимам работы.

3. **Осторожно:**

Всегда строго выполняйте инструкции, прилагающиеся к шприцу и удлинительным линиям. Точно следуйте инструкции по заполнению удлинительных линий, а также соблюдайте сроки их замены. Время использования линии не должно превышать интервал, указанный на этикетке.

Шприцевый насос не определяет наличие воздуха в удлинительной системе.

Оператор насоса должен убедиться в отсутствии воздуха в удлинительной линии.

Не устанавливайте насос вертикально, со шприцем, направленным вверх - это может привести к введению воздуха, попавшего в шприц.


Не используйте твердые или острые предметы для работы с клавиатурой.

Удостоверьтесь, что СИСТЕМА ПРОМЫТА И ИЗ НЕЕ УДАЛЕН ВЕСЬ ВОЗДУХ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ ВВЕДЕНИЕ ЛЮБОГО МЕДИКАМЕНТА. Невыполнение этой стандартной процедуры перед инфузией может привести к тяжелым последствиям

4. **Чистка**

Наружные поверхности устройства можно чистить мягкой тканью, слегка смоченной в любом из перечисленных ниже чистящих средств. Не распыляйте чистящие средства непосредственно на механизм шприца, на область сетевого разъема и интерфейсных разъемов. Не пользуйтесь для чистки твердыми инструментами. При разбавлении концентрированных чистящих средств руководствуйтесь инструкциями изготовителей. Каждый раз после использования насоса его необходимо почистить и продезинфицировать. Если прибор использовался в изолированной зоне, выберите из приведенного ниже списка те средства, которые обладают одновременно чистящим и дезинфицирующим действием. Хотя конструкция прибора защищает от пролитой жидкости, при попадании жидкости внутрь насоса обратитесь к своему продавцу или в сервисный центр изготовителя. Это необходимо сделать сразу же, чтобы свести к минимуму возможные проблемы, связанные с удалением растворов и сушкой механизма.

5. **Указание условий пересмотра СОП:**

	"Ленгерская городская поликлиника" УЗ Туркестанской области	Тип документа: СОП	
		Система менеджмента качества	Версия: 1

Пересмотр СОП проводится 1 раз в 3 года или при появлении новых требований.

1. Ссылки:

- 1) Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 август 2020 года № 96/2020 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения»;
- 2) Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 ноября 2021 года №111 «Об утверждении стандартов аккредитации медицинских организаций»;

1. Указание условия пересмотра СОП: Пересмотр СОП проводится 1 раз в 3 года или при появлении новых требований.

2. Нормативные ссылки:

- Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения, а также инструкций по их заполнению» № ҚР ДСМ-175/2020;
- Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 ноября 2021 года «Об утверждении стандартов аккредитации медицинских организаций» № ҚР ДСМ – 111.
- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 августа 2021 года № «Об утверждении «Правил оказания первичной медико-санитарной помощи» ҚР ДСМ-90
- Гуманенко Е.К. Военно-полевая хирургия. 2004;
- Юсков В.Н. Хирургия в вопросах и ответах. 2007;
- Комплект методических материалов по безопасности инъекций и сопутствующим процедурам. Приложение А: показания к использованию перчаток в системе здравоохранения. Всемирная организация здравоохранения, 2011 г;
- The Global Patient Safety Challenge - clean care is safer care. Information sheet 6: Glove use. World Health Organization, 2006;
- Обуховец Т.П., Склярова Т.П., Чернова О.В. «Основы сестринского дела». 2005 год.

Лист регистрации изменений

№	№ раздела, пункта стандарта, в которое внесено изменение	Дата внесения изменения	ФИО лица, внесшего изменения



Лист ознакомления

№	Фамилия И.О.	Должность	Дата	Подпись
1	Шамшуров Г	мр. с	04.01.2024	[Signature]
2	Абдиевбаева С.С	мед. сестра	04.01.2024	[Signature]
3	Тотайбева А	мед. сестра	04.01.2024	[Signature]
4	Халипайкулов	медсестра	04.01.2024	[Signature]
5	Ирметова А	анушер	04.01.2024	[Signature]
6	Абдулкеримов О.И	мл. мр.	04.01.2024	[Signature]
7	Вашурбаева А.Н	уч. м/с	04.01.2024	[Signature]
8	Жараккулов Р.Т	ст. мр.	04.01.2024	[Signature]
9	Оралбаев С.А	Гигиенист	04.01.2024	[Signature]
10	Абдиева Г.З	сиделка	04.01.2024	[Signature]
11	Абдурашипов М	стол. мр.	04.01.24	[Signature]
12	Обташева Н.О	стоматолог	04.01.24	[Signature]
13	Торшбаева С.И	сиделка	04.01.24	[Signature]
14	Халипайкулов М	стол. мр.	04.01.24	[Signature]
15	Абдиев Г	мл. мр.	04.01.24	[Signature]
16	Абдиева А.А	стол. мр.	04.01.2024	[Signature]
17	Саурбаев В.Н	стоматолог	04.01.2024	[Signature]
18	Шамшуров Г.К	кзр. м/с	04.01.2024	[Signature]
19	Халипайкулов А.И	мед. сестра	04.01.2024	[Signature]
20	Абдиев И.И	мл. мр.	04.01.2024	[Signature]
21	Ирметова А.Т	терапевт	04.01.2024	[Signature]
22	Абдиева Р.К	мед. сестра	04.01.2024	[Signature]
23	Абдиева М	мед. сестра	04.01.2024	[Signature]
24	Абдиева А	мед. сестра	04.01.2024	[Signature]
25	Ирметова И	анушер	04.01.2024	[Signature]
26	Абдиева С	мр. с	04.01.2024	[Signature]

